

MASQUE TISSU de forme CHIRURGICALE

Description : masque en tissu, de forme chirurgicale.

Composition :

dessus	coton imprimé
dessous	coton uni
intérieur	maille polyester/coton
élastique	polyester et fibre de caoutchouc

Entretien :

- soit en machine :
cycle coton avec lessive, à 60°C, sans enlever l'élastique
- soit au four traditionnel :
préchauffer le four à 60°C, positionner le masque sans enlever les élastiques dans un plat en céramique ou en verre (pas de métal) au milieu du four, sans eau et sans détergent,
laisser 30 minutes
- soit suspendre le masque pendant 48h sur une corde à linge. Une étude publiée par « The Lancet » semble indiquer que la durée de vie du Covid-19 sur du coton n'excède pas 48h.

- afin de préserver les qualités du caoutchouc :



ne pas nettoyer à plus de 60°C
ne pas utiliser d'eau de javel



- **ne pas mettre au micro-ondes**

Première utilisation :

- régler la longueur des élastiques situés de chaque côté du masque, par un nœud 
- serrer suffisamment le nœud pour ne pas perdre l'élastique au lavage
- faire glisser l'élastique jusqu'à ce que le nœud soit passé dans le revers et ne se voie plus

Bonne utilisation :

- Le masque doit être porté en couvrant le nez, le menton et la bouche.
- Le masque doit être manipulé seulement pour la pose et le retrait (ne pas le repositionner), et toujours par les attaches.

Il convient de :

- manipuler le masque par les liens pour l'enlever
- mettre au sale/au four/suspendre le masque sans délai après l'avoir enlevé
- pratiquer un lavage simple ou une friction hydro-alcoolique des mains avant et après chaque changement de masque
- nettoyer le masque après chaque utilisation.